



INSTRUCCIONES PARA TOMARSE UNA MUESTRA DEL PENE

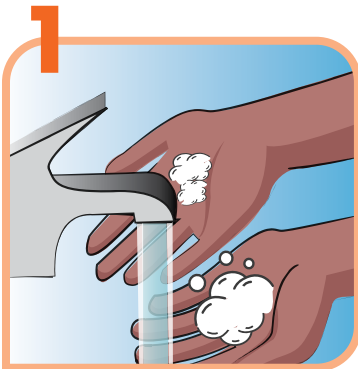


Lávese muy bien las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Quitese la ropa de la cintura para abajo.

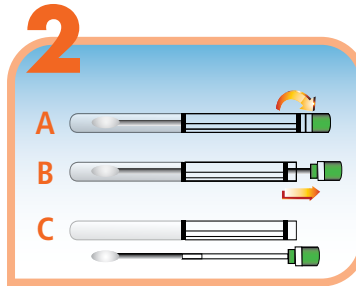


Abra el hisopo. **NO TOQUE LA PUNTA DEL HISOPO.**

- A. Primero gírelo para romper el sello.
- B. Después jale. El hisopo permanecerá unido a la tapa.
- C. ¡NO TIRE el tubo de plástico! Usted necesitará colocar su hisopo en ese tubo después de tomar la muestra.

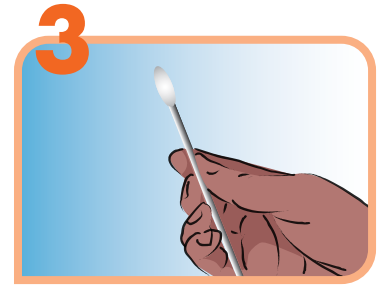


Sostenga firmemente el hisopo a una distancia de 1 a 2 pulgadas de la punta suave.

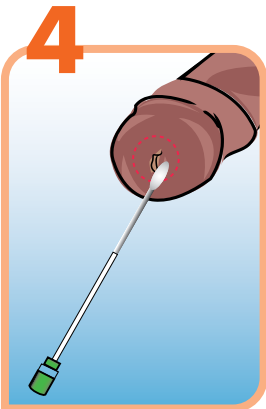

Gire el hisopo completamente alrededor de la abertura del pene. Si ve alguna secreción, asegúrese de pasar el hisopo por la secreción. No coloque el hisopo dentro del pene.




Retire el hisopo de la punta del pene. No permita que la punta del hisopo toque nada.

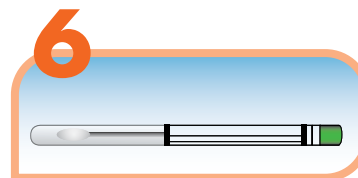


Coloque el hisopo usado dentro del tubo. Cierre muy bien el tubo para evitar fugas.



Coloque el tubo cerrado dentro de la bolsa de color rojo para las muestras. Selle la bolsa. (Si está devolviendo múltiples hisopos, todos deberán colocarse dentro de la misma bolsa para muestras).

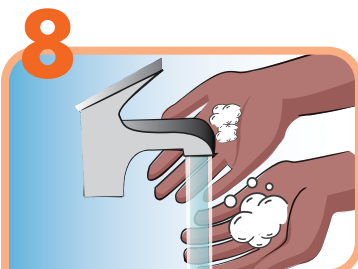

Lávese muy bien las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos.

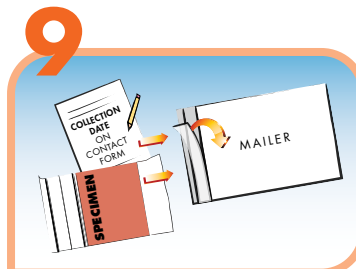

Coloque la bolsa sellada dentro del paquete que devolverá (sobre blanco con etiqueta adhesiva azul en forma de diamante en el frente). Escriba la fecha de recolección en el formulario de contacto y colóquelo también dentro del paquete que devolverá. Selle el sobre.



Deje el sobre de retorno en cualquier buzón de USPS (Servicio Postal de EE. UU.)